


# Översikt

Infinity är **cytologiborsten** för ERCP som är väl värd att testa. Den är konstruerad med två typer av borst. Infinity är designad för att borsta loss och ta med sig maximalt antal celler vid borstcytologier från gallvägarna. Den finns i två modeller. För bästa cellutbyte och resultat så klipp av borsten och spola ur katetern. Infinity passar både till kort och långt system.

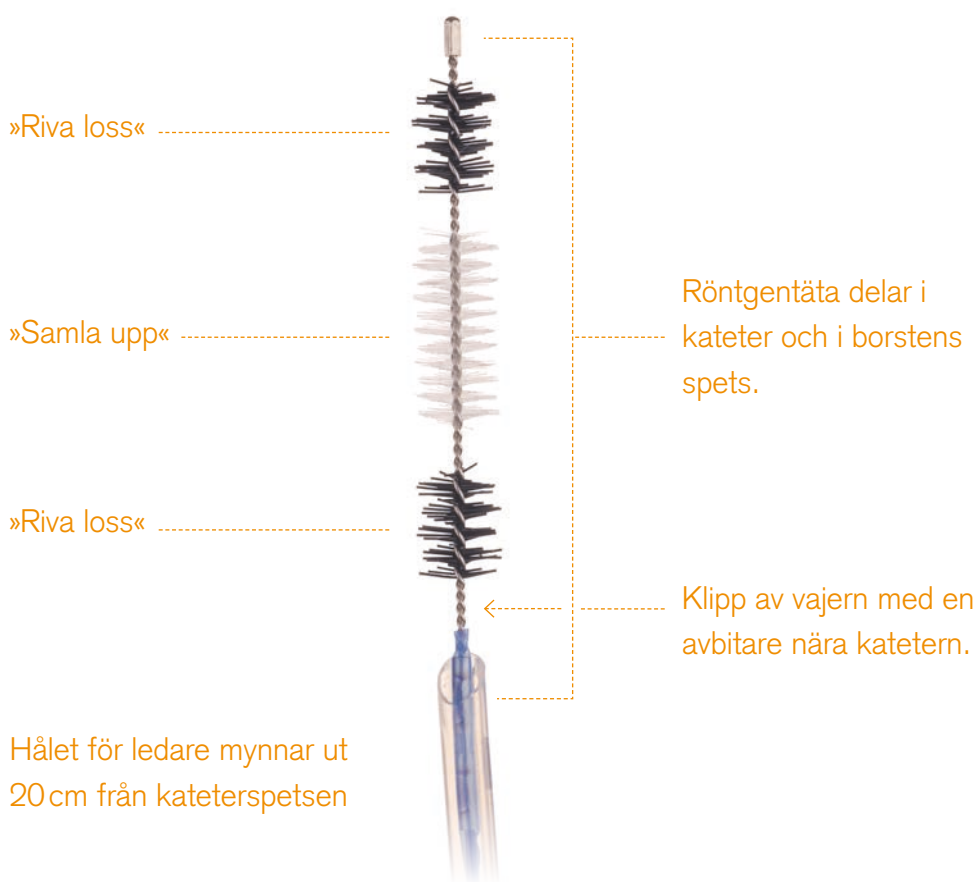

Artikelnr	Namn	Diameter på borste	Antal/förp
10-711652	Infinity ERCP	9 FR	5
10-711653	Infinity ERCP	7,5 FR	5


**TIPS:** Ordning och reda får du med hjälp av **Keeper** och **Mio**. Du hittar dem under fliken **Hyg**.

# Förberedelser

**Fukta borsten noga för att minska friktionen i katetern.** Doppa borsten i sterilt vatten/NaCl och dra in den i katetern. Upprepa 3-4 ggr.

**För in ledaren i den mindre kanalen i kateterspetsen.** Knicka katetern lätt, strax innan ledaren når hålet 20 cm upp på katetern från spetsen. Då löper ledaren enkelt ut och Infinity är redo att föras in i arbetskanalen.

Mynning för  
**långt system.**

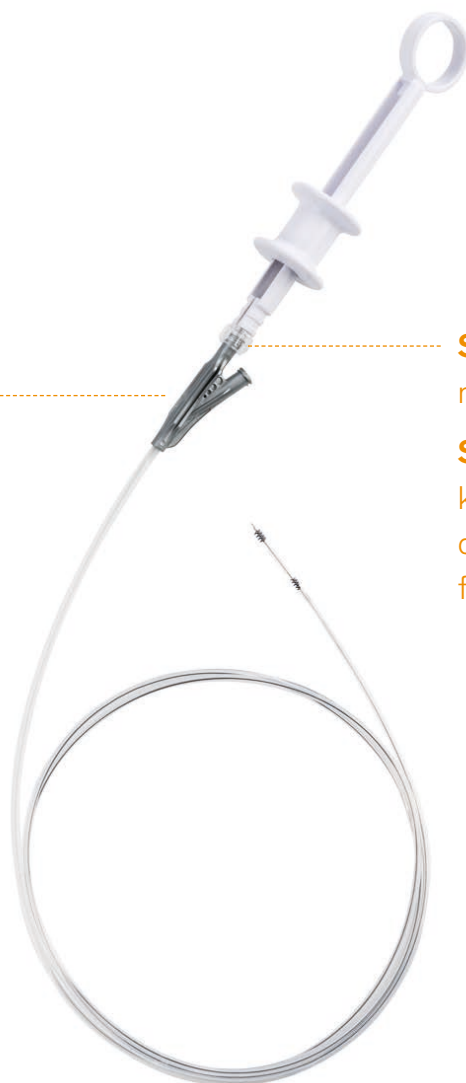

**Skruva av** handtaget när borsten är avklippt.

**Spola igenom** katetern för att ta med de celler som sitter fast i kateterspetsen.

**TIPS:** Ordning och reda får du med hjälp av **Keeper** och **Mio**. Du hittar dem under fliken **Hyg**.